

Kaatoklosetit (kosketusvapaa)

Kaatoklosetteja käytetään viemärikelpoisen kiinteän ja nestemäisen jätteen huuhtomiseen viemäriin, useimmiten terveydenhuollossa. Klosettiin voidaan tyhjentää mm. kaarimaljoja, alusastioita ja pulloja.

Kaatoaltaan pinta on sileä ja se on asennettu siten, että jätteiden hyvä huuhtoutuminen varmistuu. Huuhteluvesi valuu altaaseen tasaisesti kaatoaukon reunuksen alla olevasta suihkurenkaasta.

Jätteet huuhdellaan altaasta viemäriin kosketusvapaan huuhteluventtiilin avulla. Käsi viedään takana ylhäällä olevan anturin päälle n. 80 mm etäisyydelle. Kaatoklosetissa on jalkapolkimella toimiva pullosuihku, jonka avulla astiat voidaan huuhdella kätevästi puhtaiksi.

3076V-klosetin kaatoalue on viistottu helpottamaan astioiden tyhjentämistä ja parantamaan työskentelyergonomiaa.



Tekniset tiedot

| | |
|---|--|
| Mallit | 3076 Kaatoklosetti, kosketusvapaa, pullosuihkulla, LVI 5931017 3076V Kaatoklosetti, kosketusvapaa, pullosuihkulla, viisto, LVI 5931018 |
| Materiaali | Ruostumaton teräs AISI 304 |
| Mallien mitat (leveys x syvyys x korkeus) | 3076 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 800 mm) 3076V 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 700 mm) |
| Varusteet | Saranoitu umpikansi Jalkapolkimella toimiva pullosuihku Muovinen hajulukko |
| Lisävarusteet | 3076 ja 3076V saranoitu astiaritilä kannen sijaan, saranoitu kaatoaukollinen kansi |
| Liitännät | Kylmävesiliitäntä DN28-liitos (4,0–8,0 bar paine) Viemäriiliitäntä DN110 Sähköliitäntä 230V (sähköpistoke laitteessa) |
| Huuhteluventtiili | Kosketusvapaa ohjaus, sisältää imusuojan |
| Huuhteluaika | Tehdasasetus 11,2 litraa /huuhtelukerta 16 sekuntia. Säädettävissä huollon yhteydessä. |
| Asennus | Säädettävät etujalat, seinäkiinnitys ruuveilla, vesi- ja viemäriiliitännät, 230 V pistokeliitäntä |
| Rakenteissa huomiodut standardit ja direktiivit | EN 60204-1 Koneturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY |
| Valmistaja | KAVIKA OY, Tempo 4, 04430 Järvenpää, puh. 09 8362 0055, kavika@kavika.fi, www.kavika.fi |

